

Diversey™

Accel® INTERVention® Wipes

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Désinfectant à spectre large tuberculocide, viroicide, bactéricide fongicide

Une lingette nettoyante désinfectante préhumectée facile à utiliser basé sur les propriétés de la technologie AHP® afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les pathogènes clés - incluant les SARM, ERV, TB et norovirus offrant une désinfection à large spectre
- Élimine le norovirus, poliovirus et les pathogènes à diffusion hémotogène et est tuberculocide, et ce, en une (1) minute. C'est aussi un désinfectant à spectre large en 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures et non poreuses, tout en exploitant la puissance de Technologie AHP®. L'actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Non irritant pour les yeux et la peau
- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute

Applications

- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
- Non irritant pour les yeux et la peau





Accel[®] INTERVention[®] Wipes

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Mode d'emploi: En tant que nettoyant désinfectant à une seule étape*

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer la lingette jetable aux surfaces dures non poreuses inanimées.
- Toutes les surfaces traitées doivent rester humides pendant 1 minute.
- Essuyer les surfaces, les rincer ou les laisser sécher à l'air.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur une petite surface cachée en cas d'inquiétude d'incompatibilité, ou communiquer avec un représentant Diversey.

* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes.

Données techniques	Accel [®] INTERVention [®] Wipes
DIN	02448637
Couleur	Lingette incolore
pH	3
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Accel [®] INTERVention [®] Wipes	12 x 160 comptage 6 x 7 in. Lingettes / 15,24 x 17,78 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906585 
Accel [®] INTERVention [®] Wipes	12 x 60 comptage 10 x 10 in. Lingettes / 25,4 x 25,4 cm Seaux	Prêt-à-l'emploi	100906584 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide[®] et Design sont des marques de commerce de Virox Technologies, Inc. utilisées en vertu d'une licence.